


# MULTILIGHT ELECTRONIC 13 W

## Bedienungsanleitung

## Instructions for use

## Mode d'emploi

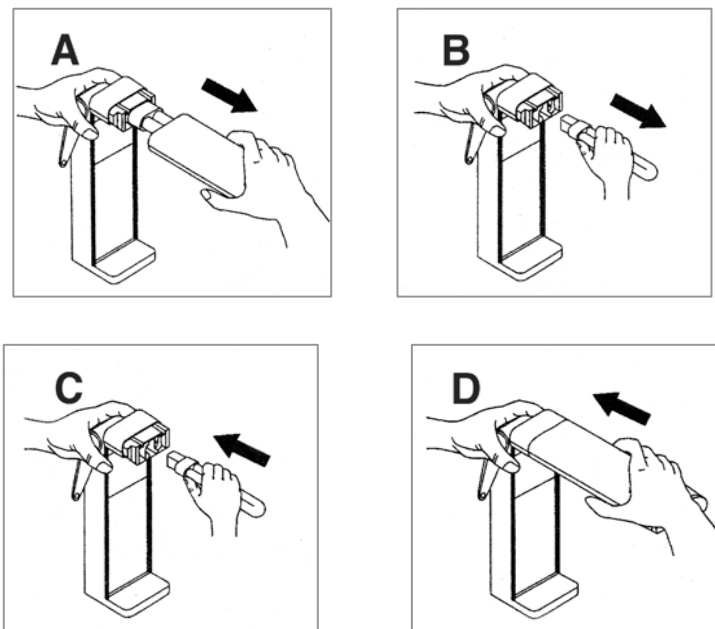

Sie haben sich für eine Leuchte aus dem Hause Schweizer entschieden. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Kaufentscheidung. Lesen Sie vor dem Gebrauch der Leuchte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

### Allgemeine Hinweise

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Achten Sie bitte darauf, dass das Anschlusskabel keine Stolpergefahr darstellt. Die Beleuchtung schalten Sie ein/aus, indem sie den Leuchtkopf auf/zuklappen. Sollte die Lampe nach dem Einschalten flackern, bitte den Leuchtenkopf nochmals zu und aufklappen.



B\_0904

Der Leuchtenkopf kann in verschiedenen Stellungen betrieben werden. Die Leuchte kann sowohl aufgestellt, als auch waagrecht an die Wand montiert werden. Zur Montage an die Wand befindet sich am Fuß die entsprechenden Aufhängevorrichtungen. Die Ausfräsung in der Mitte des Fußes ist für einen Drehfuß vorgesehen, den Sie als Zubehör erwerben können. Nähere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Optiker.

### Lampenwechsel


1. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte nicht an einer Steckdose angeschlossen ist.
2. Wenn die Lampe in Betrieb war vor dem Leuchtstoffröhrenwechsel mindestens fünf Minuten abkühlen lassen.
3. Den Schirm aus der Leuchte herausziehen und abnehmen (A)
4. Die Leuchtstofflampe zum Herausnehmen mit der Hand greifen und geradlinig aus der Fassung herausziehen (B) Die Leuchtstoffröhre nicht drehen oder schräg halten.
5. Eine neue Leuchtstoffröhre zum Einsetzen in die Fassung fest an ihrem Sockel greifen und geradlinig in die Fassung schieben, bis sie hörbar einrastet. (C)
6. Den Schirm wieder einsetzen, indem er in den Leuchtenkörper hineingeschoben wird (D)
7. Um die Spannung am Drehpunkt des Leuchtenkopfes wunschgemäß zu lockern oder zu verstärken, zwei Münzen in die Schlitze an der Seite der Leuchte stecken und in die entsprechende Richtung drehen.

*Tipp: Der Leuchtenkopf lässt sich leichter abnehmen, wenn man ihn während des Ziehens seitlich zusammendrückt*

Bitte nehmen Sie vor Betrieb den Transportschutz um das Leuchtmittel ab.

In dieser Leuchte dürfen ausschließlich 13 W Kompaktleuchtstofflampen mit Sockel G 23 verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte entfällt die Garantie und die Leuchte kann beschädigt werden!

Netzspannung: 230 V, 50 Hz

 **SCHWEIZER**  
A. Schweizer GmbH  
Hans-Böckler-Straße 7  
D-91301 Forchheim