

MAGNET- CLIP

Bedienungshinweise



Magnet-Clip-Fassung

Sie haben sich für eine Magnet-Multi-Clip Fassung entschieden, ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Schweizer, welches nach den derzeit gültigen Normen und Vorschriften hergestellt wurde. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die **Sicherheits- und Pflegehinweise**: Die Clips der Brillenfassungen sind mit Magneten ausgestattet. Dadurch können die Clips sowohl hochgeklappt als auch abgenommen werden. Trotz der außerordentlich geringen Auswirkungen der

magnetischen Kräfte auf den Träger sollten Personen, die empfindlich auf magnetische Strahlung reagieren sowie Personen mit Herzschrittmachern vor Benutzung der Magnet-Multi-Clip-Fassung ihren Arzt befragen. Bringen Sie die Magnete nicht in die Nähe von Magnetkarten (Scheck- oder Kreditkarten...) oder anderen empfindlichen Geräten oder Gegenständen. Während Sie Fahrzeuge lenken oder Maschinen bedienen sollten Sie den Clip aus Sicherheitsgründen nicht anbringen oder entfernen. Schützen Sie die Brille und die Clips vor starken Stößen wie z.B. ein Fall auf den Boden. Auch hohe

Temperaturen können die Magneten, aber auch die Gläser beschädigen. Reinigen Sie alle Teile mit handelsüblichen Brillenpflegemitteln. Bei starker Verschmutzung z.B. durch Staub oder Sand vorher unter fließendem Wasser abspülen. Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel. Zum Trocknen eignet sich am besten ein Mikrofasertuch. Die original gelieferten Filterscheiben entsprechen der Filterkategorie 2 und bieten 100 % UV-Schutz bis 400 nm. Sie sind bei schlechten Lichtverhältnissen und nachts nicht zum Autofahren geeignet.