

# Neue Funktionen der eMag 43

Die neue **eMag 43** hat jetzt 2 neue Funktionen hinzubekommen, die wir Ihnen hier kurz erklären möchten. Heben Sie diese Ergänzung zusammen mit Ihrer Bedienungsanleitung gut auf.



## 1. Neue Funktion: Speichermodus

Mittels Speichermodus können mit der **eMag 43** bis zu 15 Bilder gespeichert werden. Beim erstmaligem Speichern eines Bildes wird dieses mit den aktuellen Farbeinstellungen gespeichert. Beim Betrachten eines gespeicherten Bildes kann die Vergrößerungsstufe geändert werden.


### Speichern und Löschen eines Bildes




Bitte schalten Sie die **eMag 43** ein (grün/gelbe Taste  drücken). Dann drücken Sie die rote Taste , um das gewünschte Bild aufzunehmen.

Das Standbild auf der Anzeige kann folgendermaßen gespeichert werden:






- Die rote Taste  drücken und **6 Sek. HALTEN**, um den Speichermodus aufzurufen.
- Das Kästchen  in der linken unteren Ecke wird automatisch markiert. Dies zeigt an, dass nach Verlassen des Speichermodus das Bild abgespeichert wird.
- In der Ecke unten rechts wird nun das Vorwärts-Symbol  angezeigt. Die rote Taste  drücken, um zum nächsten Bild zu blättern. Das wiederholte Drücken der Taste  blättert durch alle in **eMag 43** gespeicherten Bilder.
- Zum Löschen eines Bildes die blaue Taste  drücken, um die Markierung des Kästchens aufzuheben. Bei Verlassen des Speichermodus wird das Bild gelöscht.
- Die rote Taste  drücken und **3 Sek. HALTEN**, um den Speichermodus zu verlassen.
- Zur Ansicht gespeicherter Bilder die rote Taste  drücken und **6 Sek. HALTEN**, um den Speichermodus aufzurufen. Danach kann, wie zuvor in diesem Abschnitt beschrieben, durch die Bilder vorwärts geblättert werden.

### Speichern eines Bildes bei vollem Speicher

**eMag 43** kann maximal 15 Bilder speichern. Wird versucht, darüber hinaus ein weiteres Bild zu speichern, wird das Symbol „Speicher voll“  in der linken unteren Ecke angezeigt. Bevor ein weiteres Bild gespeichert werden kann, müssen ein oder mehrere Bilder aus dem Speicher gelöscht werden:





- Durch Drücken der roten Taste  zum gewünschten Bild blättern und dann die blaue Taste  drücken, um die Markierung des Kästchens aufzuheben.
- Die rote Taste  drücken und **3 Sek. HALTEN**, um den Speichermodus zu verlassen. Das neue Bild wird gespeichert und alle Bilder mit nicht markierten Kästchen werden gelöscht.

## Speichermodus-Symbole

- Speichern:** Die blaue Taste  drücken, um das Kästchen zu markieren. Bei Verlassen des Speichermodus wird das Bild abgespeichert.
- Löschen:** Die blaue Taste  drücken, um die Markierung des Kästchens aufzuheben. Bei Verlassen des Speichermodus wird das Bild gelöscht.
-  **Vorwärts:** Die rote Taste  drücken, um zum nächsten Bild zu blättern. Nach Erreichen des letzten Bildes kehrt **eMag 43** zum ersten Bild zurück.
-  **Speicher voll:** Zeigt an, dass die maximale Anzahl von 15 gespeicherten Bildern in **eMag 43** erreicht wurde. Bevor das aktuelle Bild gespeichert werden kann, müssen ein oder mehrere Bilder zum Löschen markiert werden.

## 2. Neue Funktion: Die LED-Leuchten ausschalten

Beim Betrachten reflektierender Oberflächen können zum Schutz vor Blendung die LED-Leuchten ausgeschaltet werden:

- Die grün/gelbe Taste  drücken und HALTEN und dann die rote Taste  drücken. Die LED-Leuchten schalten sich aus.
- Um die Leuchten erneut einzuschalten, die grün/gelbe Taste  drücken und HALTEN und dann die rote Taste  drücken.