

# *eMag* 43 *eMag* 43 HD

Hinweise zum Akkuwechsel  
für den Fachmann

14-037/313388/00

A. SCHWEIZER GmbH  
Hans-Böckler-Str. 7, 91301 Forchheim  
Fon: +49-9191-72100, Fax: +49-9191-721072  
[www.schweizer-optik.de](http://www.schweizer-optik.de)

 **SCHWEIZER**  
Der LowVision-Spezialist

# eMag 43 / eMag 43 HD

## Hinweise zum Akkuwechsel

**Achtung:**  
Wenn ein Austausch der Akkus wegen Verschleiß notwendig wird, können Sie Ihrem Kunden schnell und einfach behilflich sein.

Passende Akkus sind in jedem elektronischen Fachhandel oder direkt bei SCHWEIZER unter der Artikel-Nr.: 543012 erhältlich.

So brauchen Sie die eMag nicht einschicken. Das spart Versandkosten und nicht unerhebliche Ausfallzeiten der Geräte bei Ihren Kunden.

Bitte ersetzen Sie alle 4 Akkus gleichzeitig durch schnellladefähige NiMH-Akkus mit ca. 1000 mAh.

### ■ Vorgehen beim Akku-Wechsel

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, wenn Sie Akkus oder Batterien einlegen möchten:

1. Halten Sie die eMag 43 / eMag 43 HD mit einer Hand. Klappen Sie mit der anderen Hand den Haltegriff komplett auf, so wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
2. Drehen Sie die eMag 43 / eMag 43 HD um, so dass das LCD-Display auf der Rückseite ist, dann schieben Sie die Batterieabdeckung in die Richtung, die der Pfeil in der folgenden Abbildung anzeigt.
3. **Hinweis:** Achten Sie beim Einlegen der Akkus oder Batterien auf richtige Polarität. Legen Sie die Akkus oder Batterien so ein, wie in der Abbildung 3 dargestellt.
4. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

