

Aufstecklinsen für SCHWEIZER Galilei- und Kepler-Systeme

Montage und Bedienungsanleitung der Basis- und der Add-on-Linsen

1. Basic-Linse auf das System stecken

Die Basic-Linse rastet auf den Galilei-Systemen spürbar ein und lässt sich – evtl. durch leichtes Verkippen – wieder abnehmen.

Auf das Kepler-System 4x12 passt die Basic-Linse ebenfalls. Für die Systeme 3x9 und 4x10 verwenden Sie bitte den Adapter Nr. 938025.

2. Add-on-Linse an der Basic-Linse befestigen und lösen

Das Scharnier der Add-on-Linse in die Passung der Basic-Linse hineinschieben bzw. herausziehen.

Bei der Anpassung können Sie die Add-on-Linse problemlos austauschen, bis Sie die richtige Kombination gefunden haben, ohne die Add-on-Linse mit der Schraube zu sichern.

3. Sicherung der montierten Add-on-Linse

Die endgültige Kombination sichern Sie durch Hineinschrauben der Sicherungsschraube um 1 bis 1,5 Umdrehungen. Die Schraube bitte nicht zu tief hineinschrauben. Es genügt, wenn diese 2/10 bis 3/10 Millimeter auf der Unterseite herausragt.

4. Tauschen der Add-on-Linse

Zum Tauschen der gesicherten Add-on-Linse die Schraube wieder heraus-schrauben und die Add-on-Linse wie unter Punkt 2 beschrieben wechseln.